



Canadian International
Development Agency

Agence canadienne de
Développement international

Proyecto financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI)



PASELO
Proyecto de Apoyo
al Sub Sector Lácteo
de Olancho

RDS-HN

Red de Desarrollo Sostenible de Honduras

¿Cómo hacer el California Mastitis Test?



1

1. Al iniciar el ordeño, colecte y elimine los primeros chorros de leche.



2

2. Recolecte en la bandeja la cantidad de 2cc de leche, utilizando una teta de la vaca para cada uno de los cuatro depósitos.



3

3. Incline la bandeja y nivele la cantidad de leche.



4

4. Agregue 2cc del reactivo California Mastitis Test (CMT) en cada uno de los depósitos de la bandeja y agite simultáneamente la mezcla.



5

5. Incline la bandeja hacia adelante y atrás, si la mezcla se pega al fondo del depósito, entonces estará marcando el grado TRAZAS (T).



6

6. Derrame la mezcla, si mira que ésta es ligeramente espesa marcará grado 1+, si resulta medianamente espesa será marca 2++ y, si es muy espesa, entonces indicará marca 3+ + +.